

LM-Активатор

LM

Показания к применению

- Рекомендуется
- Применение возможно

		Сменный прикус	Ранний сменный прикус	Поздний сменный прикус	Ранний постоянный прикус
II класс	Сильновыраженная				
	Умеренная				
Глубокий прикус	Слабовыраженная				
	Сильновыраженная				
Скученность во фронтальном отделе (резцы и клыки)	Умеренная				
	Слабовыраженная				
Ротация резцов и клыков	Сильновыраженная				
	Умеренная				
Перекрестный прикус отдельных зубов	Слабовыраженная				
	Сильновыраженная				
Перекрестный прикус	Умеренная				
	Слабовыраженная				
Десневая улыбка	Сильновыраженная				
	Умеренная				
Открытый прикус (Высокая модель LM-Активатора)	Слабовыраженная				
	Сильновыраженная				

Третий класс по Энглю является противопоказанием к применению LM-Активатора

LM-Activator™ является ортодонтическим аппаратом для раннего ортодонтического лечения, а также помогает зубам принять правильное положение при прорезывании. LM-Активатор может применяться в сменном или раннем постоянном прикусе. Стандартные аппараты имеют форму соответствующую идеальной окклюзии и выпускаются в разных размерах. 37 различных комбинаций моделей и размеров позволяют подобрать подходящий для конкретного пациента LM-Активатор без внесения индивидуальных изменений. LM-Активатор одновременно развивает зубную дугу, выравнивает зубы и выдвигает вперед нижнюю челюсть для коррекции второго класса по Энглю.

feel the difference

Мотивационный материал

Мотивационный материал для пациента (постер и наклейки) 15шт. LM 94531

Инструкция для пациента 30 шт. LM 94533

Плакат для наблюдения за дневным и ночным ношением. Он сделан в виде игры, где каждый день отмечается наклейкой, как знак успешного ношения.



Подарочные карточки

- Скейтбордист 65 шт. LM 94511
- Футболист 65 шт. LM 94512
- Велосипедист 65 шт. LM 94513
- Наездник 65 шт. LM 94514

Стартовый набор LM-Активатор

LM-Activator Starter Kit LM 94500

Стартовый набор LM-активатор содержит все необходимое для начала работы с LM-Активатором: 24 наиболее часто используемые модели LM-Активатора, 5 линеек с ручками, мотивационные материалы (постеры, наклейки и контейнеры) и силиконовый бур.



НОВИНКА!

LM-Trainer Braces LM 94100TB

Используется совместно с брекетами и проволокой. Исправляет нижнюю челюсть в соответствии со 2 классом. Предотвращает раздражение и повреждение мягких тканей.



LM-Активатор, низкий

Низкая модель может применяться при различных патологиях. Пожалуйста, используйте таблицу показаний. Доступны два варианта низкой модели – Низкая короткая и Низкая длинная.

LM

feel the difference

Низкая короткая модель – модель, укороченная в области моляров для пациентов, у которых вторые моляры еще не прорезались. Поставляется в желтом контейнере.

Низкая длинная модель – модель с удлиненной областью моляров для пациентов, у которых уже прорезались вторые моляры. Поставляется в синем контейнере.

Код заказа	Размер	Расстояние между верхними резцами (мм)	Расстояние между нижними резцами (мм)
94010LS	10	24.8 - 25.9	18.8 - 19.5
94015LS	15	26.0 - 27.1	19.6 - 20.3
94020LS	20	27.2 - 28.3	20.4 - 21.1
94025LS	25	28.4 - 29.5	21.2 - 21.9
94030LS	30	29.6 - 30.7	22.0 - 22.7
94035LS	35	30.8 - 31.9	22.8 - 23.5
94040LS	40	32.0 - 33.1	23.6 - 24.3
94045LS	45	33.2 - 34.3	24.4 - 25.1
94050LS	50	34.4 - 35.5	25.2 - 25.9
94055LS	55	35.6 - 36.7	26.0 - 26.7
94060LS	60	36.8 - 37.9	26.8 - 27.5
94065LS	65	38.0 - 39.1	27.6 - 28.3
94070LS	70	39.2 - 40.3	28.4 - 29.1

Код заказа	Размер	Расстояние между верхними резцами (мм)	Расстояние между нижними резцами (мм)
94040L	40	32.0 - 33.1	23.6 - 24.3
94045L	45	33.2 - 34.3	24.4 - 25.1
94050L	50	34.4 - 35.5	25.2 - 25.9
94055L	55	35.6 - 36.7	26.0 - 26.7
94060L	60	36.8 - 37.9	26.8 - 27.5
94065L	65	38.0 - 39.1	27.6 - 28.3
94070L	70	39.2 - 40.3	28.4 - 29.1



LM-Активатор, высокий

Высокая модель LM-Активатора более толстая в области вторых премоляров и моляров. Модель специально разработана для лечения скелетных и зубочелюстных аномалий при открытом прикусе.

Высокая короткая модель – модель, укороченная в области моляров для пациентов у кого вторые моляры еще не прорезались. Поставляется в оранжевом контейнере.

Высокая длинная модель – модель с удлиненной областью моляров для пациентов, у которых уже прорезались вторые моляры. Поставляется в зеленом контейнере.

Код заказа	Размер	Расстояние между верхними резцами (мм)	Расстояние между нижними резцами (мм)
94020HS	20	27.2 - 28.3	20.4 - 21.1
94025HS	25	28.4 - 29.5	21.2 - 21.9
94030HS	30	29.6 - 30.7	22.0 - 22.7
94035HS	35	30.8 - 31.9	22.8 - 23.5
94040HS	40	32.0 - 33.1	23.6 - 24.3
94045HS	45	33.2 - 34.3	24.4 - 25.1
94050HS	50	34.4 - 35.5	25.2 - 25.9
94055HS	55	35.6 - 36.7	26.0 - 26.7
94060HS	60	36.8 - 37.9	26.8 - 27.5
94065HS	65	38.0 - 39.1	27.6 - 28.3
94070HS	70	39.2 - 40.3	28.4 - 29.1

Код заказа	Размер	Расстояние между верхними резцами (мм)	Расстояние между нижними резцами (мм)
94045H	45	33.2 - 34.3	24.4 - 25.1
94050H	50	34.4 - 35.5	25.2 - 25.9
94055H	55	35.6 - 36.7	26.0 - 26.7
94060H	60	36.8 - 37.9	26.8 - 27.5
94065H	65	38.0 - 39.1	27.6 - 28.3
94070H	70	39.2 - 40.3	28.4 - 29.1



Линейка LM-Orthosizer



Ортодонтическая линейка с ручкой LM 942526

Ортодонтическая линейка с ручкой (конусный разъем)

LM 942826

Ортодонтическая линейка без ручки

LM 9400