

Инструкции по использованию Вайпо-Дюр (Wipo-Dur)

Прежде, чем использовать продукцию, пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции в целях правильного использования

1. Показания к применению

Основой смолы Вайпо-Дюр для изготовления зубных протезов холодным способом является акрилат полиметила. Цвет этого материала хорошо сочетается с совместимыми смолами для всprыскивания бредент. брекristал, и таким образом позволяет производить зуботехнические работы высокого качества или изготавливать дополнительные элементы для зубных протезов из материала брекristал.

2. Обработка и пропорции

Используйте супер гипс (например, Тиксо-Рок - Thixo-Rock, заказ № 570 0005 0) для изготовления модели. Остатки воска должны быть тщательно удалены со всех элементов, изготовленных из смолы. Отделите гипсовую модель посредством замачивания в жидкости Изопласт айпи (Isoplast ip, заказ № 540 0101 9). Зачистите все элементы, изготовленные из смолы, с помощью инструмента для стачивания Дайэкрil грайндинг тул (Diacryl grinding tool, заказ № 340 0103 0), чтобы как можно плотнее их соединить.

Смешайте порошок и жидкость в пропорции 7 мл: 10 г. Вылейте необходимое количество жидкости в емкость для смешивания. Постоянно перемешивая, добавьте в жидкость порошка, избегайте образования пузырьков. С Вайпо-Дюр можно работать при комнатной температуре (23 С) от 1 до двух минут. Высокая температура уменьшает время обработки, а низкая, наоборот, увеличивает его. После того, как материал становится пластичным, не дотрагивайтесь до изделия. Наилучшее качество, без образования пузырьков, достигается при температуре 50-55° С под давлением 2 бара (в течение 12 минут).

3. Срок годности и хранение

Срок годности Вайпо-Дюр составляет два года со дня изготовления. Пожалуйста, внимательно изучите срок годности продукции на упаковке и на этикетке. Материал храните при температуре не выше 25° С. Бутылка должна быть плотно закрыта после использования и храниться в защищенном от прямого солнечного света месте. Медицинские материалы следует держать в недоступном для детей месте.

4. Рекомендации по безопасности и предупреждению риска

Символы R+S

R 11 - легко воспламеняемый

R 36/37/38 - раздражает глаза, дыхательные органы и кожу

R 43 - возможна аллергическая реакция после контакта с кожей

S 9 - храните контейнер (бутылку) в хорошо проветриваемом помещении

S 16 - держать в отдалении от источников огня, в помещении не курить

S 29 - не сливать продукт в канализацию

S 33 - принимайте меры против образования электростатического заряда

В случае контакта с веществом и возникновения сомнений относительно его действия, покажите данные инструкции врачу.

5. Дополнительная информация

Информация, на которой основаны данные инструкции использования, постоянно обновляется в соответствии с новыми сведениями и опытом работы. Поэтому мы рекомендуем снова читать эти инструкции каждый раз, открывая новую упаковку. Данные инструкции относятся к материалу Вайпо-Дюр, порошок и жидкость (Wipo-Dur, заказ № 540 ORFO 5 и заказ № 540 ORPO 5).